

Manual

BIG Step-by-Step – taleknapp (ASK)



BIG Step-by-Step – taleknapp for flermeldingskommunikasjon (ASK)

BIG Step-by-Step gjør det enkelt å gå fra én enkelt melding til **sekvenser av flere meldinger**. Brukeren trykker på den store, fargede aktiveringsflaten for å spille av første melding. Ved neste trykk spilles neste melding av, og enheten fortsetter slik gjennom hele meldingsrekken. Nye meldingssekvenser kan tas opp raskt gjennom dagen, eller du kan bruke nivåfunksjonen til å forhåndsinnspille opptil tre ulike sett med meldinger.

Dette gjør BIG Step-by-Step svært godt egnet for historiefortelling, øving, struktur og aktiv deltakelse i **barnehage, skole, terapi og hjem**.

Batteri er inkludert, og enheten leveres med ableCARE-støtte ved behov. Den er bygget etter ableSTRONG-prinsippet for å tåle fall og krevende bruk, og produsert i ableSAFE-materialer testet av uavhengige sikkerhetslaboratorier.

Programmering og bruk av BIG Step-by-Step

Steg 1: Slå på enheten og velg nivå

Slå på enheten ved hjelp av volumkontrollen på baksiden og juster lydnivået. Velg ønsket nivå (1–3) dersom du skal bruke et bestemt forhåndsinnspilt meldingssett.

Steg 2: Spill inn en meldingsrekke

Start opptak ved å bruke opptaksfunksjonen på enheten. Spill deretter inn meldingene i ønsket rekkefølge, én etter én, til du er ferdig. Du kan spille inn så mange meldinger som det er plass til innen total opptakstid (opptil 4 minutter). Avslutt opptaket når sekvensen er komplett.

Steg 3: Spill av meldinger steg for steg

Trykk på den store aktiveringsflaten for å spille av første melding.

Trykk på nytt for å spille av neste melding.

Hvert trykk tar deg videre i sekvensen, slik at brukeren kan fortelle, telle eller gjennomføre en øvelse trinn for trinn. Ved nivåbytte kan du raskt gå over til et annet meldingssett.

Visuell støtte og tilpasning

BIG Step-by-Step leveres med et gjennomsiktig snap-lokk som gjør det mulig å feste bilder, symboler eller tekst. Dette gir tydelig kontekst til meldingsinnholdet og støtter forståelse og læring.

Symbolark følger ikke med. Egne symboloverlegg kan lages med gratis AbleNet Symbol Overlay-app for iPad.

Vanlige bruksområder

- Spille inn sider i en bok for å fortelle en historie
- Telle fra 1 til 10
- Stille en serie spørsmål i undervisning eller trening
- Legge til kommunikasjon i bryterstyrte leker eller apparater

Egenskaper

- Klar og tydelig digital lyd
- Leveres med rød, gul, grønn og blå topp
- Gjennomsiktig snap-lokk for symboler og bilder
- Myk aktiveringsflate som er behagelig og enkel å trykke på
- 3 nivåer for å lagre ulike meldingssett på forhånd
- Batteri inkludert
- Inkluderer ableCARE-støtte ved behov
- ableSTRONG-design for krevende bruk
- Produsert av ableSAFE-materialer og testet av uavhengige sikkerhetslaboratorier
- Produsert av AbleNet

Tekniske spesifikasjoner

- Meldinger / nivåer: så mange meldinger som får plass i 4 minutter opptakstid / 3 nivåer
- Opptakstid: 4 minutter
- Bryterinngang: 1
- Utgang for leke/apparat (ECU): 1
- Aktiveringsflate: 12,7 cm (5")
- Aktiveringskraft: 85–142 g
- Vekt med batteri: 439 g
- Batteri: 9 V alkalisk batteri (inkludert)
- Montering: Quick Ready Mounting Plate for hjelpemidler
- HCPCS-kode: E2500

BIG Step-by-Step er et solid og fleksibelt kommunikasjonshjelpemiddel som gjør det mulig å uttrykke mer enn én tanke – steg for steg, med ett enkelt trykk.