


Manual

BIG TalkingBrix – Sett med 3 store taleklosser

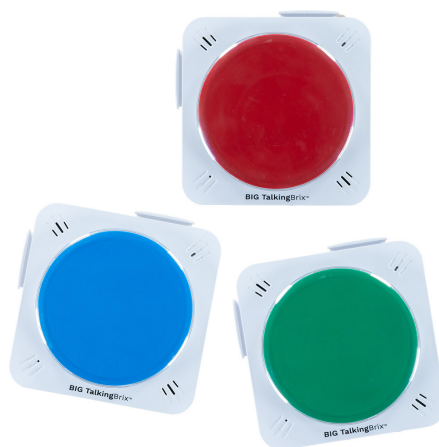

BIG TalkingBrix – sett med 3 store taleklosser for fleksibel kommunikasjon (ASK)

BIG TalkingBrix gir brukeren flere kommunikasjonsmuligheter gjennom et sett med **tre robuste taleklosser**, hver med stor og tydelig aktiveringsflate. Ved å trykke på toppen av en kloss spilles én forhåndsinnspilt melding av, med opptil **10 sekunders spilletid per kloss**. Klossene kan brukes hver for seg eller sammen for å skape en enkel flermeldingsløsning.

BIG TalkingBrix er spesielt godt egnet for brukere som trenger **stor trykkflate, tydelig respons og fleksibel plassering**. Løsningen passer godt i **barnehage, skole, terapi og hjem**.

Enhetene leveres med ableCARE-støtte ved behov, er bygget etter ableSTRONG-prinsippet for å tåle fall og krevende miljøer, og produsert i ableSAFE-materialer testet av uavhengige sikkerhetslaboratorier.

Programmering og bruk av BIG TalkingBrix

BIG TalkingBrix er laget for rask programmering og fleksibel bruk i hverdagen.

Steg 1: Slå på og klargjør klossen

Sørg for at klossen er ladet. Slå den på ved hjelp av strømfunksjonen på enheten.

Steg 2: Spill inn melding

Aktiver opptaksfunksjonen på klossen og spill inn ønsket melding, opptil 10 sekunder. Hver kloss programmeres separat og kan ha sin egen unike melding.

Steg 3: Bruk enkeltvis eller sammen

Trykk på toppen av klossen for å spille av meldingen.

Klossene kan plasseres på ulike steder i rommet, brukes side om side for valg, eller deles mellom flere brukere. Innebygd magnet gjør det enkelt å feste dem på metallflater, som tavler eller hyller.

Visuell støtte og tilpasning

Hver kloss har et **gjennomsiktig snap-lokk** som gjør det mulig å feste bilder, symboler eller tekst. Dette gir tydelig kommunikativ kontekst og hjelper brukeren å forstå hva hver kloss representerer.

Symbolark følger ikke med. Egne symboloverlegg kan lages med gratis AbleNet Symbol Overlay-app for iPad, tilpasset brukerens behov og situasjon.

Vanlige bruksområder

- Plassere klosser strategisk i klasserom eller hjem for rask, situasjonsbasert kommunikasjon
- Gi tydelige valgmuligheter ved å bruke flere klosser samtidig
- La flere personer bruke hver sin kloss med egen melding
- Støtte rutiner, aktiviteter, lek og samspill

Egenskaper

- Klar og kraftig digital lyd
- Stor aktiveringsflate for enkel og trygg bruk
- Oppladbart batteri med lang levetid
- Gjennomsiktig snap-lokk for symboler og bilder
- Innebygd magnet i hver kloss for enkel montering
- Robust design for daglig og krevende bruk
- Produsert av AbleNet

Tekniske spesifikasjoner

- Antall enheter: 3
- Antall meldinger per enhet: 1
- Opptakstid: opptil 10 sekunder per melding
- Aktivering: Trykk (trykkfølsom)
- Aktiveringskraft: ca. 71 g
- Aktiveringsflate: 8,8 cm
- Montering: Innebygd magnet
- Batteri: Oppladbart (USB-kabel inkludert)
- Ladekabel: Mini-USB
- Vekt per enhet: 162 g
- Garanti: 2 års begrenset garanti
- HCPCS-kode: E2500

BIG TalkingBrix er en **solid, fleksibel og brukervennlig** kommunikasjonsløsning som gjør det enkelt å bygge kommunikasjon der behovet oppstår – med **tydelige valg, raske meldinger og høy tilgjengelighet**.