

Manual

BIGmack – enkel taleknapp (ASK)



BIGmack – enkel taleknapp for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

BIGmack er et brukervennlig og robust taleredskap som gir barn og voksne en enkel inngang til kommunikasjon. Med ett trykk på den store, fargede aktiveringsflaten spiller enheten av **én forhåndsinnspilt melding på opptil 2 minutter**. Meldinger kan raskt tas opp og endres, slik at BIGmack enkelt kan tilpasses ulike situasjoner gjennom dagen.

BIGmack er utviklet for daglig bruk i **skole, barnehage, terapi og hjem**, og gir brukeren mulighet til å delta aktivt i kommunikasjon, samspill og læring.

Programmering og bruk av BIGmack

Det finnes flere varianter av BIGmack og lignende én-meldings-enheter, men opptak og programmering fungerer i hovedsak likt. Slik programmeres en BIGmack:

1. **Slå på enheten**
Bruk volumkontrollen på baksiden av BIGmack for å slå den på og justere ønsket lydnivå.
2. **Start opptak**
Hold inne den lille knappen på baksiden av enheten merket «REC», samtidig som du holder inne den store knappen på toppen.
Et rødt lys vises på baksiden – meldingen kan nå spilles inn.
3. **Avslutt opptak**
Slipp begge knappene når meldingen er ferdig innspilt. Enheten er nå programmert.
Trykk på den store knappen på toppen for å kontrollere at meldingen spilles riktig.
4. **Slå av etter bruk**
Når BIGmack ikke er i bruk, skal den alltid slås av med volumkontrollen på baksiden for å spare batteri.

Når enheten er programmert, vil **samme melding spilles av hver gang** brukeren trykker på aktiveringsflaten, helt til meldingen endres.

Visuell støtte og tilpasning

BIGmack leveres med et gjennomsiktig snap-lokk som gjør det mulig å feste bilder, symboler eller tekst. Dette gir tydelig visuell støtte og hjelper brukeren med å forstå hva meldingen representerer.

Symbolark følger ikke med, men gratis AbleNet Symbol Overlay-app for iPad kan brukes til å lage egne symboler og visuelle overlegg.

Vanlige bruksområder

- Be om noe, for eksempel «Jeg vil ha» eller «Jeg trenger hjelp»
- Delta i aktiviteter med meldinger som «Bla om siden» eller «Nå er det din tur»
- Dele opplevelser i samlingsstund eller i klasserommet
- Lek og samspill sammen med bryterstyrte leker eller apparater

Egenskaper

- Klar og tydelig digital lyd
- Leveres med rød, gul, grønn og blå topp
- Myk aktiveringsflate som er behagelig og enkel å trykke på
- Batteri inkludert
- Inkluderer ableCARE-støtte ved behov
- ableSTRONG-design som tåler fall og krevende bruk
- Produsert av ableSAFE-materialer og testet av uavhengige sikkerhetslaboratorier
- Produsert av AbleNet

Tekniske spesifikasjoner

- Antall meldinger: 1
- Maks opptakstid: 2 minutter
- Antall nivåer: 1
- Bryterinngang: 1
- Utgang for leke/apparat (ECU): 1
- Aktiveringsflate: 12,7 cm (5")
- Aktiveringskraft: 85–142 g
- Vekt med batteri: 439 g
- Batteri: 9 V alkalisk batteri (inkludert)
- Montering: Quick Ready Mounting Plate