

Manual

LITTLEmack



LITTLEmack – kompakt taleknapp for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

LITTLEmack er en liten, lett og brukervennlig taleknapp som gir barn og voksne en enkel inngang til alternativ og supplerende kommunikasjon. Med ett trykk på den fargede aktiveringsflaten spiller enheten av **én forhåndsinnspilt melding på opptil 2 minutter**. Meldinger kan raskt tas opp og endres gjennom dagen, slik at kommunikasjonen enkelt kan tilpasses ulike situasjoner og aktiviteter.

LITTLEmack er ideell for bruk i **barnehage, skole, terapi og hjem**, særlig der det er behov for en **mer kompakt løsning enn BIGmack**, eller der lav aktiveringskraft og liten størrelse er viktig.

Programmering og bruk av LITTLEmack

LITTLEmack programmeres på tilsvarende måte som andre én-meldings taleknapper og er laget for enkel og rask bruk.

Steg 1: Slå på enheten

Slå på LITTLEmack ved hjelp av volumkontrollen på baksiden av enheten. Juster volumet til ønsket nivå.

Steg 2: Spill inn melding

Hold inne opptaksknappen på baksiden av enheten merket «REC», samtidig som du holder inne den fargede aktiveringsflaten på toppen.

Et lys indikerer at opptak pågår. Spill inn ønsket melding, opptil 2 minutter.

Steg 3: Avslutt opptak og bruk

Slipp begge knappene når meldingen er ferdig. Enheten er nå programmert.

Trykk på aktiveringsflaten for å kontrollere at meldingen spilles riktig.
Når LITTLEmack ikke er i bruk, slås den av med volumkontrollen for å spare batteri.

Den samme meldingen spilles av hver gang brukeren trykker på aktiveringsflaten, helt til meldingen endres.

Visuell støtte og tilpasning

LITTLEmack leveres med et **gjennomsiktig snap-lokk** som gjør det mulig å feste bilder, symboler eller tekst. Dette gir tydelig visuell støtte og hjelper brukeren med å forstå hva meldingen representerer.

Symbolark følger ikke med. Gratis AbleNet Symbol Overlay-app for iPad kan brukes til å lage egne symboler og visuelle overlegg, slik at kommunikasjonen blir mer personlig og målrettet.

Vanlige bruksområder

- Be om noe, for eksempel «Jeg vil ha» eller «Jeg trenger hjelp»
- Delta i aktiviteter med meldinger som «Bla om siden» eller «Nå er det din tur»
- Fortelle om opplevelser i samlingsstund eller morgenmøte
- Legge til kommunikasjon i bryterstyrte leker eller apparater

Egenskaper

- Klar og tydelig digital lyd
- Leveres med rød, gul, grønn og blå topp
- Myk aktiveringsflate som er behagelig og enkel å trykke på
- Gjennomsiktig snap-lokk for symboler og bilder
- Batteri inkludert
- Inkluderer ableCARE-støtte ved behov
- ableSTRONG-design som tåler fall og daglig bruk
- Produsert av ableSAFE-materialer og testet av uavhengige sikkerhetslaboratorier
- Produsert av AbleNet

Tekniske spesifikasjoner

- Antall meldinger: 1
- Opptakstid: opptil 2 minutter
- Antall nivåer: 1
- Bryterinnngang: 1
- Utgang for leke/apparat (ECU): 1
- Aktiveringsflate: 6,4 cm (2,5")
- Aktiveringskraft: 57–85 g
- Vekt med batteri: 241 g
- Batteri: 9 V alkalisk batteri (inkludert)
- Montering: Quick Ready Mounting Plate for hjelpemidler
- HCPCS-kode: E2500

LITTLEmack er et **pålitelig, kompakt og fleksibelt** kommunikasjonsverktøy som gir brukeren en tydelig stemme med **ett enkelt trykk**, og er spesielt godt egnet for tidlig kommunikasjon og målrettet bruk i hverdagen.