

Manual

QuickTalker FeatherTouch 12



QuickTalker FeatherTouch 12 – avansert flermeldingskommunikasjon i bærbart format (ASK)

QuickTalker FeatherTouch 12 er et kraftig og brukervennlig talesystem som gir omfattende flermeldingskommunikasjon i en portabel og slitesterk enhet. Den svært følsomme FeatherTouch-membranen reagerer på selv lette berøringer og små fingre, noe som gjør enheten tilgjengelig for brukere med ulike motoriske forutsetninger.

Med **48 unike meldinger fordelt på 5 opptaksnivåer** får brukeren rike og fleksible kommunikasjonsmuligheter gjennom hele dagen – i **skole, barnehage, terapi og hjem**.

Enheden leveres med batterier inkludert, ableCARE-støtte ved behov, er bygget etter ableSTRONG-prinsippet for å tåle fall og krevende bruk, og produsert i ableSAFE-materialer testet av uavhengige sikkerhetslaboratorier.

Programmering og bruk av QuickTalker FeatherTouch 12

QuickTalker FeatherTouch 12 er bygget opp med **kjernebeskjeder** og **nivåavhengige meldinger**, slik at brukeren får både stabilitet og situasjonstilpasset kommunikasjon.

Steg 1: Slå på enheten og velg nivå

Slå på enheten og velg ønsket opptaksnivå (1–5). Hvert nivå kan representere et miljø eller en aktivitet, for eksempel klasserom, kantine, lekeplass, transport eller hjem.

Steg 2: Spill inn meldinger

På hvert nivå kan du spille inn:

- **3 kjernebeskjeder** som er tilgjengelige på alle nivåer
- **9 nivåavhengige meldinger** som endres når nivået byttes

Hold inne opptaksfunksjonen for ønsket felt og spill inn meldingen. Total opptakstid er **opptil 12 minutter**, fordelt på alle meldinger.

Steg 3: Bruk i kommunikasjon

Meldingene aktiveres ved å trykke direkte på de trykkfølsomme feltene på fronten.

Kjernebeskjedene er alltid tilgjengelige, mens de øvrige meldingene automatisk tilpasses valgt nivå. Dette gir brukeren riktig ordforråd i riktig situasjon, uten kompliserte valg.

Visuell støtte og tilpasning

QuickTalker FeatherTouch 12 kan brukes med symboler, bilder eller tekst for tydelig visuell støtte. Symbolark følger ikke med, men egne symboloverlegg kan lages med gratis AbleNet Symbol Overlay-app for iPad, tilpasset brukerens behov, miljø og ferdighetsnivå.

Vanlige bruksområder

- Spille inn tre faste kjernebeskjeder som «Jeg trenger hjelp», «Jeg må på toalettet» og «Jeg er tørst»
- Bruke meldinger som «Bla om siden», «Se», «Jeg liker dette» og «Jeg vil stoppe» ved lesing og aktiviteter
- Tilpasse hvert nivå til ulike miljøer som klasserom, kantine, lekeplass, buss og hjem
- Støtte deltakelse i undervisning, lek, rutiner og sosialt samspill

Egenskaper

- Svært sensitiv FeatherTouch-aktivering for presis og enkel bruk
- Klar og forbedret digital lyd
- 3 kjernebeskjeder tilgjengelig på alle nivåer
- 9 nivåavhengige meldinger per nivå
- Totalt 48 meldinger tilgjengelig
- Praktisk bærehåndtak for enkel transport
- Batterier inkludert
- Inkluderer ableCARE-støtte ved behov
- ableSTRONG-design for krevende bruk
- Produsert av ableSAFE-materialer
- Produsert av AbleNet

Tekniske spesifikasjoner

- Meldinger / opptaksnivåer: 9 + 3 kjernebeskjeder / 5 nivåer
- Total opptakstid: opptil 12 minutter
- Bryterinnngang: Nei
- Utgang for leke/apparat (ECU): Nei
- Aktiveringsflater:
 - Kjernebeskjeder: ca. 8,6 × 6,7 cm

- Unike meldinger: ca. 5,5 × 4,3 cm
- Vekt med batterier: 748 g
- Batteri: 4 × AA (inkludert)
- Montering: Ingen (bærehåndtak inkludert)
- HCPCS-kode: E2502

QuickTalker FeatherTouch 12 er et **fleksibelt, robust og intuitivt** kommunikasjons hjelpemiddel som gir brukeren mulighet til å uttrykke seg tydelig i mange ulike situasjoner – **hele dagen, uansett hvor de befinner seg.**