

Manual

QuickTalker FeatherTouch 23



QuickTalker FeatherTouch 23 – omfattende flermeldingskommunikasjon i bærbart format (ASK)

QuickTalker FeatherTouch 23 er et kraftig og svært fleksibelt talesystem som gir **avansert flermeldingskommunikasjon** i en portabel, slitesterk og brukervennlig enhet. Den følsomme FeatherTouch-membranen reagerer på selv svært lette berøringer, noe som gjør enheten tilgjengelig for brukere med ulike motoriske forutsetninger.

Med **103 unike meldinger fordelt på 5 opptaksnivåer** gir QuickTalker FeatherTouch 23 rike og detaljerte kommunikasjonsmuligheter gjennom hele dagen – i **skole, barnehage, terapi og hjem**.

Enheten leveres med batterier inkludert, ableCARE-støtte ved behov, er bygget etter ableSTRONG-prinsippet for å tåle fall og krevende bruk, og produsert i ableSAFE-materialer testet av uavhengige sikkerhetslaboratorier.

Programmering og bruk av QuickTalker FeatherTouch 23

QuickTalker FeatherTouch 23 er bygget opp med **kjernebeskjeder og nivåavhengige meldinger**, slik at brukeren får både stabil kommunikasjon og stort ordforråd tilpasset ulike situasjoner.

Steg 1: Slå på enheten og velg nivå

Slå på enheten og velg ønsket opptaksnivå (1–5). Hvert nivå kan brukes til et eget miljø eller en aktivitet, for eksempel klasserom, kantine, lekeplass, transport eller hjem.

Steg 2: Spill inn meldinger

På hvert nivå kan du spille inn:

- **3 kjernebeskjeder** som er tilgjengelige på alle nivåer
- **20 nivåavhengige meldinger** som endres når nivået byttes

Hold inne opptaksfunksjonen for ønsket felt og spill inn meldingen. Den totale opptakstiden er **opptil 18 minutter**, fordelt på alle meldinger.

Steg 3: Bruk i kommunikasjon

Meldingene aktiveres ved å trykke direkte på de trykksfølsomme feltene på fronten.

Kjernebeskjedene er alltid tilgjengelige, mens de øvrige meldingene automatisk tilpasses valgt nivå. Dette gir brukeren tilgang til mange uttryksmuligheter uten kompliserte valg eller navigering.

Visuell støtte og tilpasning

QuickTalker FeatherTouch 23 kan brukes med bilder, symboler eller tekst for tydelig visuell støtte. Symbolark følger ikke med, men egne symboloverlegg kan lages med gratis AbleNet Symbol Overlay-app for iPad. Dette gjør det mulig å tilpasse kommunikasjonen til brukerens behov, miljø og ferdighetsnivå.

Vanlige bruksområder

- Spille inn tre faste kjernebeskjeder som «Jeg trenger hjelp», «Jeg må på toalettet» og «Jeg er tørst»
- Bruke meldinger som «Bla om siden», «Se», «Jeg liker dette» og «Jeg vil stoppe» ved lesing og aktiviteter
- Tilpasse hvert opptaksnivå til ulike miljøer som klasserom, kantine, lekeplass, buss og hjem
- Støtte deltakelse i undervisning, lek, rutiner og sosialt samspill

Egenskaper

- Svært sensitiv FeatherTouch-aktivering for presis og enkel bruk
- Klar og forbedret digital lyd
- 3 kjernebeskjeder tilgjengelig på alle nivåer
- 20 nivåavhengige meldinger per nivå
- Totalt 103 meldinger tilgjengelig
- Praktisk bærehåndtak for enkel transport
- Batterier inkludert
- Inkluderer ableCARE-støtte ved behov
- ableSTRONG-design for krevende bruk
- Produsert av ableSAFE-materialer
- Produsert av AbleNet

Tekniske spesifikasjoner

- Meldinger / opptaksnivåer: 20 + 3 kjernebeskjeder / 5 nivåer
- Total opptakstid: opptil 18 minutter
- Bryterinngang: Nei

- Utgang for leke/apparat (ECU): Nei
- Aktiveringsflater:
 - Kjernebeskjeder: ca. $8,6 \times 6,7$ cm
 - Unike meldinger: ca. 3×3 cm
- Vekt med batterier: 748 g
- Batteri: $4 \times$ AA (inkludert)
- Montering: Ingen (bærehåndtak inkludert)
- HCPCS-kode: E2502

QuickTalker FeatherTouch 23 er et **avansert, robust og intuitivt** kommunikasjonshjelpemiddel som gir brukeren mulighet til å uttrykke seg **nyansert, selvstendig og situasjonstilpasset** – hele dagen, uansett hvor de befinner seg.