

Manual

TalkingBrix 2 – Sett med 3 taleklosser



TalkingBrix 2 – sett med 3 taleklosser for fleksibel kommunikasjon (ASK)

TalkingBrix 2 gir økt valgfrihet og fleksibilitet i alternativ og supplerende kommunikasjon. Settet består av **tre kompakte taleklosser**, der hvert trykk på den fargede toppen spiller av **én forhåndsinnspilt melding på opptil 10 sekunder**. Klossene kan brukes hver for seg eller sammen for å lage en enkel flermeldingsløsning, noe som gjør dem godt egnet for valg, samspill og strukturert kommunikasjon.

TalkingBrix 2 er utviklet for daglig bruk i **klasserom, hjem og terapi**, og gir rask tilgang til kommunikasjon der behovet oppstår. Klossene er robuste, lette å plassere og enkle å bruke.

Enhetene leveres med ableCARE-støtte ved behov, er bygget etter ableSTRONG-prinsippet for å tåle fall og krevende bruk, og produsert i ableSAFE-materialer testet av uavhengige sikkerhetslaboratorier.

Programmering og bruk av TalkingBrix 2

TalkingBrix 2 er laget for rask programmering og fleksibel bruk i hverdagen.

Steg 1: Klargjør klossene

Sørg for at klossene er ladet. Slå dem på ved hjelp av strømfunksjonen.

Steg 2: Spill inn meldinger

Aktiver opptaksfunksjonen på hver kloss og spill inn ønsket melding, opptil 10 sekunder. Hver kloss programmeres individuelt og kan inneholde sin egen melding.

Steg 3: Bruk der behovet oppstår

Trykk på toppen av en kloss for å spille av meldingen.

Klossene kan plasseres side om side for å gi valgmuligheter, fordeles mellom flere brukere, eller festes på metallflater ved hjelp av innebygd magnet.

Visuell støtte og tilpasning

Hver kloss har et **gjennomsiktig snap-lokk** som gjør det mulig å feste bilder, symboler eller tekst. Dette gir tydelig kommunikativ kontekst og støtter forståelse og bruk.

Symbolark følger ikke med. Egne symboloverlegg kan lages med gratis AbleNet Symbol Overlay-app for iPad, tilpasset brukerens behov.

Vanlige bruksområder

- Plasseres strategisk i klasserom eller hjem for kommunikasjon «der og da»
- Brukes sammen for å gi tydelige valgmuligheter
- Brukes av flere personer samtidig, der hver har sin egen melding
- Støtte til rutiner, aktiviteter og samspill

Egenskaper

- Klar lyd av høy kvalitet
- Oppladbart batteri med lang levetid
- Kompakt størrelse for enkel håndtering og plassering
- Gjennomsiktig snap-lokk for symboler og bilder
- Innebygd magnet i hver kloss for enkel montering
- Robust design for daglig bruk
- Produsert av AbleNet

Tekniske spesifikasjoner

- Antall enheter: 3
- Antall meldinger per enhet: 1
- Opptakstid: opptil 10 sekunder per enhet
- Aktivering: Trykk (trykkfølsom)
- Aktiveringsflate: Liten (under 6,35 cm)
- Montering: Innebygd magnet
- Batteri: Oppladbart
- Ladekabel: Mini-USB (inkludert)
- Vekt per enhet: 136 g
- Produktmål: 6,7 × 6,7 × 1,6 cm
- Garanti: 2 års begrenset garanti
- HCPCS-kode: E2500

TalkingBrix 2 er en **enkel, fleksibel og robust** kommunikasjonsløsning som gjør det lett å bygge kommunikasjon – **én melding, ett valg og én kloss om gangen.**