

Manual

iTalk 2 – taleknapp med to valg (ASK)



iTalk2 – taleknapp med to valg for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

iTalk2 er en enkel og effektiv taleknapp som gir brukeren **to tydelige kommunikasjonsvalg side om side**. Ved å trykke på den røde eller gule aktiveringsflaten spilles ønsket melding av. Enheten er spesielt godt egnet for **valgkommunikasjon, ja/nei-svar og tidlig ASK**, samt i situasjoner der brukeren trenger oversiktlige og tydelige alternativer.

Meldinger kan tas opp raskt i løpet av dagen, eller forhåndsinnspilles ved hjelp av nivåfunksjonen som gir tilgang til **tre ulike meldingssett**. iTalk2 er utviklet for daglig bruk i **barnehage, skole, terapi og hjem**.

Enheten leveres med batteri inkludert, ableCARE-støtte ved behov, er bygget etter ableSTRONG-prinsippet for å tåle fall og krevende bruk, og produsert i ableSAFE-materialer testet av uavhengige sikkerhetslaboratorier.

Programmering og bruk av iTalk2

iTalk2 er bygget for enkel programmering og tydelig bruk med to valg.

Steg 1: Slå på enheten og velg nivå

Slå på iTalk2 ved hjelp av volumkontrollen på baksiden. Velg ønsket nivå (1–3), avhengig av hvilket meldingssett som skal brukes.

Steg 2: Spill inn meldinger

Hold inne opptaksknappen på baksiden av enheten.

Trykk samtidig på den **røde eller gule aktiveringsflaten** for å spille inn meldingen som skal

knyttes til denne.

Gjenta for den andre knappen. Total opptakstid er opptil 4 minutter fordelt på alle meldinger.

Steg 3: Bruk i kommunikasjon

Når meldingene er spilt inn, aktiveres de ved å trykke på den røde eller gule flaten.

Brukeren får da et tydelig valg mellom to forhåndsinnspilte meldinger.

Bytte av nivå gir tilgang til et nytt sett med meldinger uten å måtte spille inn på nytt.

Visuell støtte og tilpasning

iTalk2 leveres med et **gjennomsiktig snap-lokk** som gjør det mulig å feste bilder, symboler eller tekst over hver aktiveringsflate. Dette gir tydelig visuell støtte og hjelper brukeren å forstå de to valgene.

Symbolark følger ikke med. Egne symboloverlegg kan lages ved hjelp av gratis AbleNet Symbol Overlay-app for iPad, slik at kommunikasjonen kan tilpasses brukerens behov og ferdighetsnivå.

Vanlige bruksområder

- Ja/nei-svar
- Valg mellom to alternativer, som mat, drikke eller aktiviteter
- To ulike forespørsler, for eksempel «Jeg trenger hjelp» og «Jeg er ferdig»
- Strukturert kommunikasjon i barnehage, skole, terapi og hjem

Egenskaper

- To store og tydelige aktiveringsflater (rød og gul)
- Klar og tydelig digital lyd
- Gjennomsiktig snap-lokk for symboler og bilder
- Myk overflate som er behagelig og enkel å trykke på
- 3 nivåer for flere forhåndsinnspilte meldingssett
- Batteri inkludert
- Inkluderer ableCARE-støtte ved behov
- ableSTRONG-design for krevende bruk
- Produsert av ableSAFE-materialer og testet av uavhengige sikkerhetslaboratorier
- Produsert av AbleNet

Tekniske spesifikasjoner

- Antall meldingsplasser: 2
- Antall nivåer: 3
- Totalt antall meldinger: 6
- Opptakstid: totalt opptil 4 minutter
- Bryterinnganger: 2
- Utgang for leke/apparat (ECU): 2
- Aktiveringsflate: 6,4 cm (2,5")
- Aktiveringskraft: 57–142 g

- Vekt med batteri: 354 g
- Batteri: 9 V alkalisk batteri (inkludert)
- Montering: Quick Ready Mounting Plate for hjelpemidler

iTalk2 er et **pålitelig, brukervennlig og oversiktlig** kommunikasjonsverktøy som gjør det enkelt å uttrykke valg, behov og svar – **to meldinger, ett trykk av gangen.**