

Manual

iTalk 4 – taleknapp med fire valg (ASK)



iTalk4 – taleknapp med fire valg for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

iTalk4 er en enkel og oversiktlig taleknapp som gir brukeren **fire tydelige kommunikasjonsvalg side om side**. Ved å trykke på en av de fargede aktiveringsflatene spilles ønsket melding av. Enheten er godt egnet for **mer avansert valgkommunikasjon**, strukturert samspill og situasjoner der brukeren trenger flere uttrykksmuligheter samtidig.

Meldinger kan tas opp fortløpende gjennom dagen, eller forhåndsinnspilles ved hjelp av nivåfunksjonen som gir tilgang til **tre ulike meldingssett**. iTalk4 er utviklet for daglig bruk i **barnehage, skole, terapi og hjem**.

Enheten leveres med batterier inkludert, ableCARE-støtte ved behov, er bygget etter ableSTRONG-prinsippet for å tåle fall og krevende bruk, og produsert i ableSAFE-materialer testet av uavhengige sikkerhetslaboratorier.

Programmering og bruk av iTalk4

iTalk4 er laget for enkel programmering og oversiktlig bruk med fire valg.

Steg 1: Slå på enheten og velg nivå

Slå på iTalk4 ved hjelp av strøm-/volumkontrollen. Velg ønsket nivå (1–3) avhengig av hvilket meldingssett som skal brukes.

Steg 2: Spill inn meldinger

Hold inne opptaksknappen på baksiden av enheten.

Trykk deretter på én av de fire aktiveringsflatene for å spille inn meldingen som skal knyttes til denne flaten.

Gjenta for de øvrige knappene. Total opptakstid er opptil 6 minutter fordelt på alle meldinger.

Steg 3: Bruk i kommunikasjon

Når meldingene er spilt inn, aktiveres de ved å trykke på ønsket aktiveringsflate.

Brukeren får umiddelbar tilgang til fire tydelige valg.

Ved å bytte nivå kan man raskt gå til et nytt meldingssett uten å spille inn på nytt.

Visuell støtte og tilpasning

iTalk4 leveres med et **gjennomsiktig snap-lokk** som gjør det mulig å feste bilder, symboler eller tekst over hver aktiveringsflate. Dette gir tydelig visuell støtte og bidrar til bedre forståelse av valgene.

Symbolark følger ikke med. Egne symboloverlegg kan lages ved hjelp av gratis AbleNet Symbol Overlay-app for iPad, slik at kommunikasjonen kan tilpasses bruker, situasjon og aktivitet.

Vanlige bruksområder

- Gi ulike svar på spørsmål, for eksempel «Hvordan er været ute?»
- Bruk i kartlegginger og vurderinger
- Flere samtidige forespørsler, som «Jeg trenger hjelp», «Jeg er ferdig», «Jeg må på toalettet» og «Jeg er tørst»
- Legge til kommunikasjon i bryterstyrte leker eller apparater

Egenskaper

- Fire tydelige aktiveringsflater for oversiktlig bruk
- Klar og tydelig digital lyd
- Gjennomsiktig snap-lokk for symboler og bilder
- 3 nivåer for flere forhåndsinnspilte meldingssett
- Batterier inkludert
- Inkluderer ableCARE-støtte ved behov
- ableSTRONG-design for krevende bruk
- Produsert av ableSAFE-materialer og testet av uavhengige sikkerhetslaboratorier
- Produsert av AbleNet

Tekniske spesifikasjoner

- Antall meldingsplasser: 4
- Antall nivåer: 3
- Totalt antall meldinger: 12
- Opptakstid: totalt opptil 6 minutter
- Aktivering: Trykk (trykkfølsom)
- Aktiveringsflate: Liten (under 6,35 cm)
- Vekt: 658 g
- Batteri: 4 × AA alkalisk batterier (inkludert)
- HCPCS-kode: E2500
- Garanti: 2 års begrenset garanti

iTalk4 er et **robust, brukervennlig og fleksibelt** kommunikasjonsverktøy som gir brukeren **flere tydelige valg**, og dermed økt selvstendighet og aktiv deltakelse i hverdagen.

